

CIRCULYPHE® COMPLEXE H crème

Dispositif médical CE 0051

Le dispositif médical **CIRCULYPHE® COMPLEXE H crème** est une crème qui aide dans le processus réparateur du canal anorectal et peut soulager les symptômes désagréables du syndrome hémorroïdaire tels que les brûlures, les gonflements et les démangeaisons. Il agit efficacement, procurant un soulagement immédiat, adoucit et hydrate la peau périanale, soutenant l'intégrité physiologique de la zone et diminuant toute fissuration gênante.

L'Acide hyaluronique, le beurre de Karité et le Panthénol présents dans la **crème CIRCULYPHE® COMPLEXE H** forment un film protecteur qui limite la déshydratation cutanée et le contact avec des agents externes irritants ou sensibilisateurs. Ils jouent un rôle important dans la réparation des tissus car ils accélèrent et modulent le processus de ré-épithélialisation, rétablissant la tonicité et l'élasticité des tissus et favorisant la régénération de la barrière cutanée normale.

L'efficacité de la **crème CIRCULYPHE® COMPLEXE H** est également garantie par une formule contenant des ingrédients naturels tels que le Fragon, l'Aescine, l'Hamamélis et la Troxérutine qui soutiennent l'activité mécanique des comportements mentionnés précédemment. L'Allantoïne, ingrédient à l'action dermo-protectrice prouvée, est efficace pour soulager les symptômes inflammatoires.

L'application de la **crème CIRCULYPHE® COMPLEXE H** plusieurs fois par jour prévient la formation d'hémorroïdes et de fissures tout en maintenant l'élasticité physiologique de la peau. Elle peut être utilisée à la fois de façon préventive et sur l'hémorroïde déjà manifestée afin de faciliter la résolution des symptômes associés.

Ingrédients [IL-6136-B] : Eau, Glycérine, Huile d'Amande douce (*Prunus amygdalus dulcis*), Alcool cétéarylique, Triglycérade caprilique/caprique, Polyglycéril-3 stéarate, Esters d'huile de graines de Tournesol (polyglycéril-4 esters), Alcool cétylique, Beurre de Karité (*Butyrospermum parkii*), Benzoate de sodium, Acétate de tocophéryl, Déhydroacétate de sodium, Panthénol, Sorbate de potassium, Allantoïne, Gomme xanthane, Hyaluronate de sodium, Diacétate de glutamate tétrasodique, Extrait de racines de Petit houx (*Ruscus aculeatus*), Extrait de feuilles d'Hamamélis (*Hamamelis virginiana*), Aescine, Troxérutine, Lécithine, Tocophérol, Palmite de l'ascorbyle.

Conseils d'utilisation : laver avec précaution et sécher délicatement la zone à traiter, puis appliquer, en utilisant la canule, une petite quantité de la **crème CIRCULYPHE® COMPLEXE H** (5g, équivalent à une dose du produit). Répéter périodiquement l'application, si possible après chaque évacuation et après la toilette quotidienne, et chaque fois que les symptômes deviennent gênants. Laver bien la canule après application. Il est possible de répéter le traitement jusqu'à 3 à 4 fois par jour. Après utilisation du produit, éviter le contact avec les yeux et se laver soigneusement les mains.

CIRCULYPHE®
COMPLEXE H crème

Packaging : tube en PEHD de 50ml.

Péremption : Le lot et la date de péremption sont indiqués sous l'étui. La date de péremption fait référence au produit intact et conservé correctement.

Date de dernière révision : Février 2020



Adultes



Complexe à
base de plantes



Application
cutanée



Crème



CE 0051

CIRCULYPHE® COMPLEXE H crème - Tube de 50 ml.
Référence : PHSV180 - Code ACL : 6107723

Fabriqué en Italie.

Distribué par :
Santé Verte France
11/19 rue de Tauzia
33800 Bordeaux

Le Service Santé Verte
Pour plus d'informations : infos@sante-verte.com
www.sante-verte.com

Laboratoires
**santé
verte**

CIRCULYMPHE® COMPLEXE H crème

Dispositif médical CE 0051

Précautions d'emploi : tenir hors de portée et de vue des enfants. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans. Le produit peut être utilisé chez les femmes enceintes et allaitantes, il est cependant recommandé de consulter son médecin avant utilisation. Ne pas ingérer. L'utilisation de produits à usage topique, en particulier de façon prolongée ou en l'absence d'amélioration après 2 semaines, peut donner lieu à des phénomènes de sensibilisation. Dans un tel cas, il est nécessaire d'interrompre le traitement et de consulter un médecin afin de mettre en place une thérapie appropriée. En cas de saignement, consulter un médecin avant utilisation.

Contre-indications et effets secondaires : ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité individuelle avérée envers un ou plusieurs des composants. Ne pas utiliser avec d'autres dispositifs médicaux ou médicaments sans avoir consulté l'avis d'un médecin. L'application du produit sur des muqueuses particulièrement irritées peut provoquer l'apparition d'une sensation momentanée de chaleur ou de brûlure légère qui disparaît en quelques minutes.

Conservation : ne pas utiliser la crème CIRCULYMPHE® COMPLEXE H après la date d'expiration indiquée sous l'étui. Utiliser le produit dans les 3 mois après ouverture, à conserver à température ambiante et loin de toute source de chaleur. Ne pas utiliser le produit après la période recommandée. Ne pas utiliser le produit au-delà de 30 jours sans l'avis d'un médecin. Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé. La date de préemption fait référence au produit intact et conservé correctement.

LÉGENDE



• Ne pas jeter dans la Nature.



• Conserver à l'abri de la lumière du soleil.



• Consulter les instructions d'utilisation.



• Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.



• Fabricant.



Pharmalife Research s.r.l.
Via Casa Paradiso 2/A
23846 Garbagnate Monastero (LC) Italy.



CIRCULYMPHE®
COMPLEXE H crème

Packaging : tube en PEHD de 50ml.

Date de dernière révision : Février 2020



Adultes



Complexe à
base de plantes



Application
cutanée



Crème

CIRCULYMPHE® COMPLEXE H crème - Tube de 50 ml.
Référence : PHSV180 - Code ACL : 6107723

Fabriqué en Italie.

Distribué par :
Santé Verte France
11/19 rue de Tauzia
33800 Bordeaux

Le Service Santé Verte
Pour plus d'informations :

infos@sante-verte.com
www.sante-verte.com



CE 0051

Laboratoires
**santé
verte**